

COLHEITA DE HEMOCULTURAS COM SISTEMA BUTTERFLY (MÉTODOS RECOMENDADOS)



COLHEITA DE HEMOCULTURAS*

- Não usar garrafas danificadas ou fora de validade.
- Retirar a tampa. Desinfetar & permitir secar ao ar.
- Colher 2-3 hemoculturas.
- 10 ml de sangue por garrafa, para paciente adulto.
- Volume baseado no peso, para pacientes pediátricos.**
- Transportar para o laboratório logo que possível.

RECOMENDAÇÕES PARA COLHEITA DE HEMOCULTURAS

<p>1 VERIFICAR A ID DO PACIENTE & PREPARAR O MATERIAL</p>	<p>2 PREPARAR AS GARRAFAS PARA INOCULAÇÃO</p> <p>Lavar as mãos ou desinfetá-las com álcool.</p> <p>Retirar a tampa de plástico.</p> <p>Desinfetar o septo da garrafa e deixar secar.</p>	<p>3 PREPARAR O LOCAL PARA PUNÇÃO VENOSA</p> <p>Palpar para encontrar a veia.</p> <p>Calçar luvas limpas.</p> <p>Desinfetar a pele.</p> <p>Deixar secar ao ar.</p>	<p>4 COLHER COM O SISTEMA BUTTERFLY</p> <p>Conectar o dispositivo de colheita à tampa adaptadora.</p> <p>Para prevenir a contaminação, não voltar a palpar. Puncionar a veia preparada.</p>
<p>5 INOCULAÇÃO DA GARRAFA</p> <p>Colher primeiro para a garrafa de aeróbios. Certifique-se de que a garrafa está corretamente cheia até à marca ou nível a atingir, como demonstrado. Repetir o procedimento na garrafa de anaeróbios.</p>	<p>6 TERMINAR O PROCEDIMENTO</p> <p>Registrar a data da colheita, hora e local da punção. Etiquetar as garrafas de acordo com as recomendações do fabricante. Transportar as garrafas inoculadas, tão rápido quanto possível à temperatura ambiente, para o laboratório.</p>	<p>7 ETIQUETAGEM CORRETA</p>	<p>NUNCA</p> <p>Deixar algodão em cima do septo Recolocar a tampa de plástico Colocar a etiqueta no local errado</p>

* As melhores práticas para a colheita de hemoculturas variam consoante os países e as instituições de cuidados de saúde: consulte as orientações aplicáveis na sua instituição. Este cartão baseia-se nas recomendações da Organização Mundial de Saúde para colheitas de sangue (WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy-2010-ISBN 978 92 4 1599221).

** Garrafas pediátricas disponíveis.

CHEKLIST P/ COLHEITA, COM SISTEMA BUTTERFLY

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desinfetante de pele aprovado <input type="checkbox"/> Garrafas para hemoculturas (idealmente 2 a 3 hemoculturas; 1 hemocultura = 1 garrafa para aeróbios + 1 para anaeróbios) <input type="checkbox"/> Sistema de colheita butterfly <input type="checkbox"/> Tubos de colheita de sangue (se for necessário colher sangue para outros testes de laboratório) <input type="checkbox"/> Adaptador de tubo p/colheita (se necessário) <input type="checkbox"/> Luvas <input type="checkbox"/> Toallete descartável | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Torniquete <input type="checkbox"/> Gaze <input type="checkbox"/> Penso <input type="checkbox"/> Recipiente para resíduos <input type="checkbox"/> Caneta para registar a data da colheita, hora e local |
|--|---|

NOTA: colher SEMPRE a hemocultura PRIMEIRO